

SKÖTSELINSTRUKTIONER

- Håll badrumsliften ren och snygg genom att torka av den med ett mildt tvålrengöringsmedel.

WC-stolen och tvättstället har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår inga rengöringsproblem.

- Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas.

Starka syror, t.ex. saltsyra eller svavelsyra och starka alkalier som kaustiksoda får inte användas.

- Se till att badrumsliften minst en gång per år får en grundlig genomgång av auktoriserad personal.

Tillse att kontroll görs av det mekaniska systemet, el/elektroniska systemet och VVS-systemet samt att liften får en grundlig rengöring och eventuell smörjning av hjulaxlar för lyftgejdersystemet.

- Om obehaglig doft skulle framträda från avlopps-systemet, finns troligen någon otäthet vid avloppsanslutningen.

Detta måste åtgärdas omedelbart, kontakta VVS-ansvarig.

- Överbelasta inte badrumsliften, genom att överskrida maximal belastnings vikt.

- Skulle det uppstå några frågetecken angående skötseln av badrumsliften, var vänlig kontakta NH & IR's service-avdelning TEL. 0525 - 506 00.

FUNKTIONSKONTROLL

Se upp för klämrisken.

Stick ej in hand eller arm vid höjd-reglage för att undvika klämskador.

**Arbete med liften får ej ske med
spänning påslagen.**

- Håll manöverreglaget med sladden åt dig.

- Tryck på reglageknappen märkt med upp-pil och prova om liften kan nivåregleras utefter hela sin löpbana, tryck därefter på ned-pilen och upprepa proceduren.

- Kontrollera att inget tar emot när liften regleras upp eller ned, om så är fallet måste problemet åtgärdas omedelbart.
- Kontrollera att gången är mjuk och lugn.
- Kontrollera att liften stannar omedelbart när båda reglage knapparna på manöverreglaget trycks in samtidigt.
- Kontrollera att liften stannar omedelbart när brukaren släpper reglageknappen för upp eller ned färd.
- Kontrollera att varmt och kallt vatten kommer fram och att det går att reglera temperaturen med blandaren.
- Kontrollera spolfunktionen av toaletten i båda ändlägena för liften.

Underhåll

- Bryt inkommande spänning till liften vid all underhålls arbete genom att:

A. Koppla ur säkring från säkringsskåp

- Notera i serviceboken alla service ingrepp som produkten genomgått

SERVICEINTERVALL

- Rengörning av lyftgejderna.

- Smörjning av hjulaxlar vid behov.

- Kontroll av kabel och kabel genomföringar.

- Kontroll av slangar

- Kontroll av gummibälg.

- Kontroll av klämskydd.

BULLERNIVÅ

- Vedertagen A-vägd bullernivå, ekvivalent kontinuerlig överstiger inte 70 dBA.

- Maximalt momentant C-vägt ljudtrycks värde vid liften överstiger inte 63 Pa.