

Bano WC-stödhandtag / ryggstöd / väggstödhandtag / duschstång / duschsits / tillbehör

Drift- och skötseldokumentation



BANO SVERIGE AB

Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm - Sverige
Telefon: +46 (0)8 30 11 10
Telefax: +46 (0)8 651 16 22

1-5

Bano WC-stödhandtag

Drift- och skötseldokumentation

Produkter:

5600/R-02 höger och **5600/L-02** vänster
900 mm Bano grått stödhandtag med höjdjustering

5607/R-02 höger och **5607/L-02** vänster
700 mm Bano grått stödhandtag med höjdjustering

5600/R-B-02 höger och **5600/L-B-02** vänster
900 mm Bano svart stödhandtag med höjdjustering

5607/R-B-02 höger och **5607/L-B-02** vänster
700 mm Bano svart stödhandtag med höjdjustering

5601-02 900 mm Bano grått stödhandtag utan höjdjustering

5608-02 700 mm Bano grått stödhandtag utan höjdjustering

5601-B-02 900 mm Bano svart stödhandtag utan höjdjustering

5608-B-02 700 mm Bano svart stödhandtag utan höjdjustering

5603 Bano WC-stödhandtag- 900 mm- grå
för kasset 5970S-EL och 5970-MA

5604 Bano WC-stödhandtag- 700 mm- grå
för kasset 5970S-EL och 5970-MA

5603-B Bano WC-stödhandtag- 900 mm- svart
för kasset 5970S-EL och 5970-MA

5604-B Bano WC-stödhandtag- 700 mm- svart
för kasset 5970S-EL och 5970-MA

5603-EL Bano WC-stödhandtag med elknapp i handtaget- 900 mm- grå
För kasset 5970S-EL

5604-EL Bano WC-stödhandtag med elknapp i handtaget- 700 mm- grå
För kasset 5970S-EL

5972-02 Bano ryggstöd - grå- för 5970 WC-skål

5972-B-03 Bano ryggstöd - svart- för 5970 WC-skål

5972-03 Bano ryggstöd - grå- för 5975 WC-skål

5972-03B Bano ryggstöd - svart- för 5975 WC-skål

5600/L-02



5601-02



5603



5972-02



5972-03



Materialspecifikation

- **WC-stödhandtag:** integralskum med polyuretanlack
- **Fästskenor:** natureloxerad aluminiumlegering
- **Plastknoppar:** formsprutad polypropylen
- **Ryggstöd:** Integralskum med polyuretanlack

Skötsel

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och lösningsmedel får ej användas.


Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

Produkter:

- 5581/L-G** Bano duschstång- vänster- grå
5581/R-G Bano duschstång- höger- grå
5581/L Bano duschstång- vänster- vit
5581/R Bano duschstång- höger- vit
- 5581/L-B** Bano duschstång- vänster- svart metallic
5581/R-B Bano duschstång- höger- svart metallic
- 5591/ L-G** Bano vinklat stödhandtag- vänster- grå
5591/ R-G Bano vinklat stödhandtag- höger- grå
- 5591/ L** Bano vinklat stödhandtag- vänster- vit
5591/ R Bano vinklat stödhandtag- höger- vit
- 5591/ L-B** Bano vinklat stödhandtag- vänster svart metallic
5591/ R-B Bano vinklat stödhandtag- höger svart metallic
- 5440-G** Stödhandtag 400 mm- grå
5460-G Stödhandtag 600 mm- grå
5480-G Stödhandtag 800 mm- grå
54100-G Stödhandtag 1000 mm- grå
- 5440** Stödhandtag 400 mm- vit
5460 Stödhandtag 600 mm- vit
5480 Stödhandtag 800 mm- vit
54100 Stödhandtag 1000 mm- vit
- 5440-B** Stödhandtag 400 mm- svart metallic
5460-B Stödhandtag 600 mm- svart metallic
5480-B Stödhandtag 800 mm- svart metallic
54100-B Stödhandtag 1000 mm- svart metallic

Materialspecifikation

- **Stödhandtag, vinklat stödhandtag, duschstång:** antibakteriell pulverlackerad aluminium, nylon, rostfria skruvar.
- **Handduschhållare:** nylon, ABS-plast

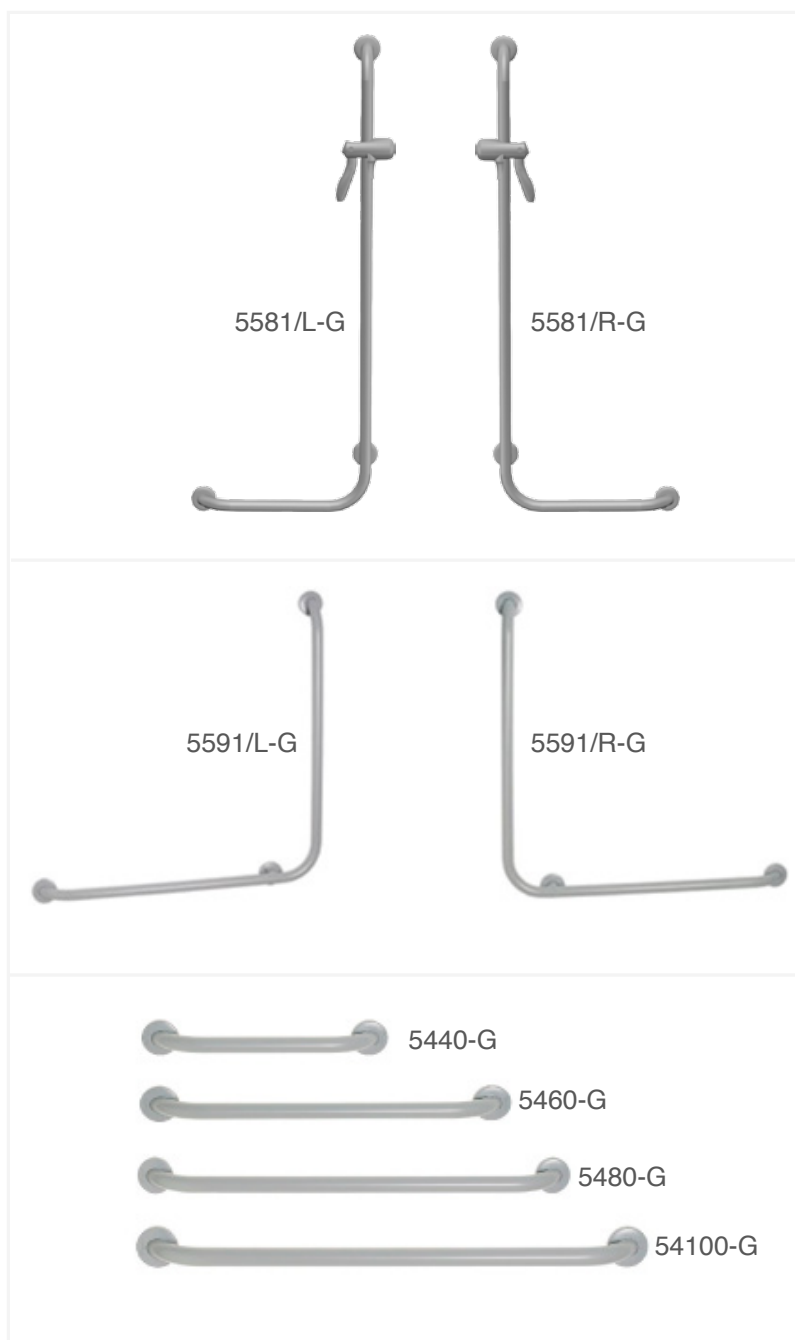

Skötsel

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och lösningsmedel får ej användas.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

Bano duschsits och sidostöd

Drift- och skötseldokumentation

Produkter:

5700-02 Bano duschsits med höjjustering- grå

5700-B-02 Bano duschsits med höjjustering- svart

5701-02 Bano duschsits utan höjjustering- grå

5701-B-02 Bano duschsits utan höjjustering- svart

5710-02 Bano sidostöd- grå

5710-B-02 Bano sidostöd- svart



Materialspecifikation

- **Duschsits och sidostöd:** integralskum med polyuretanlack
- **Fästskenor:** natureloxerad aluminiumlegering
- **Plastknoppar:** formsprutad polypropylen

Skötsel

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och lösningsmedel får ej användas.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!

Produkter:

3477-G Bano vägghängd toalettborste - grå

3477 Bano vägghängd toalettborste- vit

5400/G Bano enkelkrok- grå

5400 Bano enkelkrok- vit

5400/B Bano enkelkrok- svart

5402-G Bano dubbelkrok- grå

5402 Bano dubbelkrok- vit

5402-B Bano dubbelkrok- svart

5491-G Bano badrumshylla - grå

5491 Bano badrumshylla - vit

5491-B Bano badrumshylla- svart

5596-G Bano duschhylla- grå

5596 Bano duschhylla- vit

5596-B Bano duschhylla- svart

5496-G Bano papperskorg 10L- grå

5496 Bano papperskorg 10L- vit

5510 Bano kryck-och käpphållare

3477-G




5402-G



5400-G



5596-G

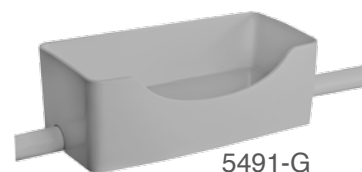

5491-G

5496-G



5510



Materialspecifikation

- **Duschhylla/ badrumshylla:** nylon
- **Badrumskrok:** Helgjuten i nylon
- **Papperskorg:** Nylon
- **Toalettborste:** Gjuten i polypropenplast med hållare i ABS-plast
- **Kryck- och käpphållare:** ABS-plast och gummi

Skötsel

För rengöring används vanliga rengöringsmedel. Använd en mjuk trasa eller svamp och ett mildt rengöringsmedel. Spreja och torka av med en fuktig trasa. Skurpulver och stålull bör ej användas då de förstör ytfinishen. Det går bra att använda rengöringsmedel som innehåller alkohol och används inom sjukvården.

Varning

Använd aldrig skurmedel eller rengöringsmedel som innehåller starka kemikalier. Syror, metanol, rödsprit, lacknafta och lösningsmedel får ej användas.

Tack för att du tog dig tid att läsa igenom dessa instruktioner!